

Emis par le service:	Approuvé par:	Date:	Révision:	Page:
MKT	A. Schreyer	24.04.2017	2	1

Consigli per l'uso :

- Le turbine, i contrangoli ei pezzi a mano devono essere in perfetto stato.
- Introdurre gli strumenti accuratamente ec senza usare forza nella pinza di serraggio. Gli strumenti miniaturizzati devono essere stretti nella pinza fino all' estremità della loro parte cilindrica
- La forza di pressione di lavoro si situa tra 0.3 et 2 N (30-200 p). Una pressione esagerata deve assolutamente essere evitata.
- Rispettare assolutamente le velocità di rotazione raccomandate sull'imballaggio e nella tabella allegata.
- Durante la preparazione evitare assolutamente i blocagi e effetti di leva.
- Eliminare immediatamente gli strumenti piegati o che non girano più in modo concentrico..
- Assicurare un raffreddamento sufficiente (al minimo 50 ml/min) sulla parte lavorante ; una deviazione dello spray rischia di provocare lesioni di origine termica.

Raccomandazioni per l'igiene :

- Prima della prima utilizzazione e immediatamente dopo l'uso, gli strumenti devono essere disinfettati, puliti, asciugati e sterilizzati.
- Rispettare i tempi e il modo di disinfezione anzi che le temperature di sterilizzazione.
- Prima della sterilizzazione, mettere gli strumenti in recipienti adeguati..
- Dopo la sterilizzazione, conservare gli strumenti al riparo della polvere sopra dei supporti o in recipienti. Gli strumenti di chirurgia saranno conservati in recipienti chiusi.
- Vitesse recommandée : Velocità raccomandata
- Vitesse maximum : Velocità massima
- Vitesse de rotation Velocità di rotazione
- Vitesse pour grains Velocità per grani
- Laboratoire Laboratorio
- Vitesse de rot. Marquée d'un code marcata da un codice